

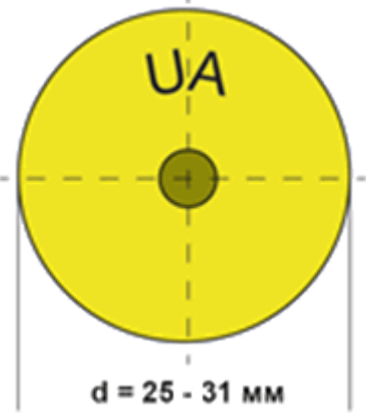
ІНСТРУКЦІЯ
з використання вушних бирок
для великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз

✓ Бирка вушна для великої рогатої худоби та свиней складається з двох частин – передньої (жіночий компонент бирки) та задньої пластин (чоловічий компонент бирки), що з'єднуються між собою запірним механізмом за допомогою спеціального аплікатора безпосередньо на вусі тварини. Бирка для овець та кіз є суцільна пластина, що має запірний механізм, який складається з жіночого та чоловічого компоненту.

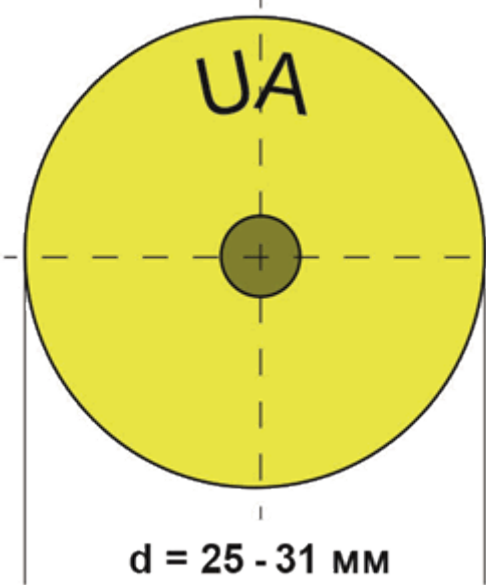
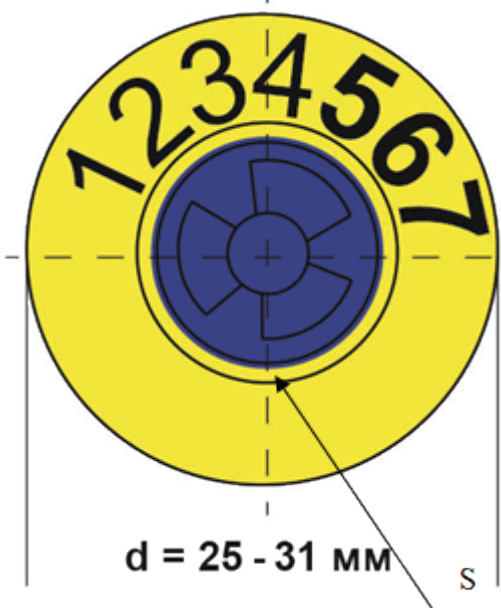
ЗРАЗОК
бирки вушної для ідентифікації великої рогатої худоби



**Зразок
бирки вушної для ідентифікації племінних свиней**

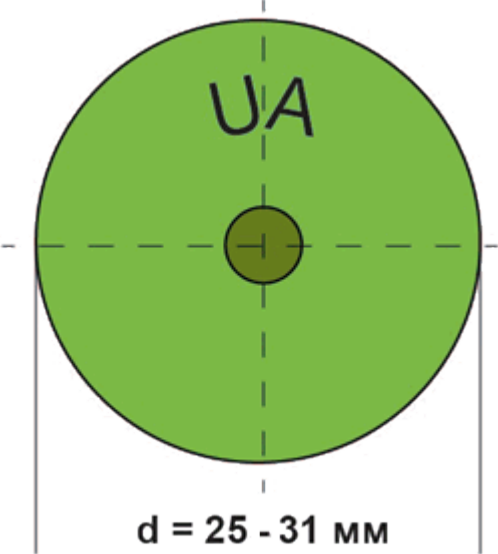
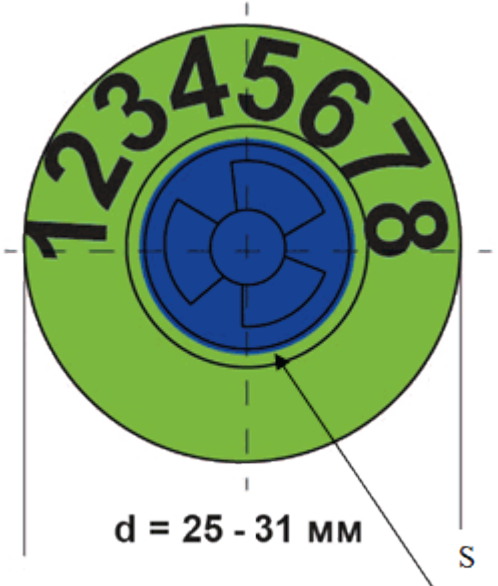
Вхідна частина	Порожниста частина
 $d = 25 - 31 \text{ mm}$	 $d = 25 - 31 \text{ mm}$ S
позиції 1, 2 ідентифікаційного номера - літерний код країни, де тварину ідентифіковано, відповідно до ISO3166	позиції 3 - 13 - одинадцять цифр ідентифікаційного номера тварини, з яких п'ять останніх цифр - робочий номер тварини S-частина бирки вушної, яка залежить від технологічного процесу виробництва та може бути випуклою, порожнистою з отворами чи без тощо

**Зразок
бирки вушної для ідентифікації товарних свиней з індивідуальним номером**

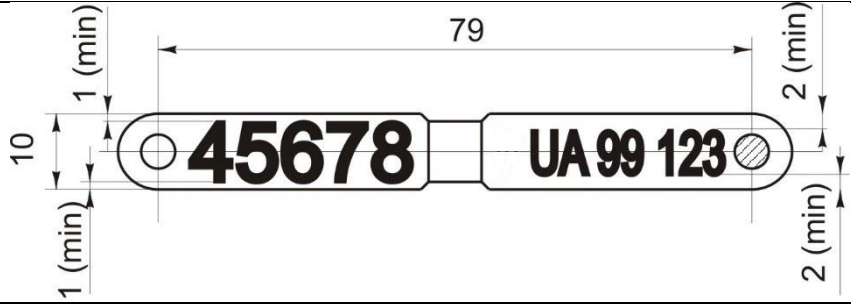
Вхідна частина	Порожниста частина
 $d = 25 - 31 \text{ mm}$	 $d = 25 - 31 \text{ mm}$ S

позиції 1, 2 ідентифікаційного номера - літерний код країни, де свиню ідентифіковано, відповідно до ISO3166	позиції 3 - 9 - сім цифр ідентифікаційного номера свині; S-частина бирки вушної, яка залежить від технологічного процесу виробництва та може бути випуклою, порожнистою з отворами чи без тощо
--	--

Зразок
бирки вушної для ідентифікації товарних свиней з груповим номером

Вхідна частина	Порожниста частина
 $d = 25 - 31 \text{ мм}$	 $d = 25 - 31 \text{ мм}$ S
позиції 1, 2 ідентифікаційного номера - літерний код країни, де тварину ідентифіковано, відповідно до ISO3166	позиції 3, 4 ідентифікаційного номера - цифровий код області, де проводилась ідентифікація тварини; позиції 5 - 10 - номер господарства в області; S-частина бирки вушної, яка залежить від технологічного процесу виробництва та може бути випуклою, порожнистою з отворами чи без тощо

Зразок бирки вушної для ідентифікації овець і кіз

 Technical drawing of an ear tag. The tag is elongated with rounded ends. It features a central identification code '45678' and a country code 'UA 99 123' on the right. Dimensions are indicated: a total length of 79, a width of 10, and a thickness of 1 (min) at the ends. The right end has a diameter of 2 (min). The tag is shown with a small hole on the left and a larger hole on the right.
Колір бирки: для овець – жовтий для кіз – світло-зелений
позиції 1, 2 ідентифікаційного номера – літерний код країни, де тварину ідентифіковано; позиції 3-7 ідентифікаційного номера – п'ять перших цифр номера тварини; позиції 8-12 ідентифікаційного номера – п'ять останніх цифр номера тварини (робочий номер)

✓ Для кріплення бирки на вухо тварини використовують тільки ті аплікатори, що поставляються в комплекті з бирками.

Аплікатор для прикріплення бирок великої рогатої худоби та свиней



Аплікатор для прикріплення бирок овець і кіз



✓ Прокол вуха тварини здійснюється чоловічим компонентом бирки, що встановлюється на металевий штир аплікатора.



✓ Для прикріплення бирки на вухо тварини, потрібно:

 Чоловічий компонент бирки надіти на металевий штир аплікатора обов'язково до упору.



 Жіночий компонент бирки вставити та закріпити у фіксуючій частині аплікатора.

 Чоловічий компонент бирки підвести відносно жіночого компоненту бирки перевіривши їх сумісність і в разі необхідності їх відцентрувати.





- ✦ Зафіксувати голову тварини нерухомо на момент кріплення бирки;
- ✦ Продезінфікувати конусну частину чоловічого компонента бирки та місце проколу вушної раковини дезінфікуючим розчином.
- ✦ Прокол вуха чоловічим компонентом бирки здійснюється на межі між першою та середньою частинами вуха, посередині між двома повздовжніми вушними венами.



 Підвести аплікатор до місця прикріплення бирки під прямим кутом і пробити вухо тварини з необхідним зусиллям, з'єднавши обидві пластини бирки.

 Обережно зняти аплікатор і звільнити тварину.

 Обов'язково перевірити з'єднані пластини бирки.